

BONA

## CAD/CAM スキャンワックス使用上の注意

レーザースキャン用の微粉末の比重が、ワックスより重いです。  
ワックスと微粉末が分離しないようご使用ください。

- 少量溶かしてワックスアップしてください。大量にワックスを溶かすとワックスと微粉末が沈殿します。
  - ワックスポットにスキャンワックスを溶かし、それを液体のままにして使用しないで下さい。  
ワックスポットの使用は厳禁です。
  - スキャンワックスの表面をみがかないでください。
  - スキャンワックスをあまり熱くしないでください。  
最も良いのは、電気ワックス・インストルメントを使うことです。
  - トーチでワックスを溶かさないうで下さい。
  - スキャンワックスと他のワックスを混ぜ合わせないでください
- 少量溶かすことが大変重要です、レーザースキャン用の微粉末の比重がワックスより重いです。  
ワックスと微粉末を均一な状態になるよう使用するようお願いします。



エーピーエス株式会社

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-4-27 TEL06-6261-8241  
東京営業所 東京都台東区東上野 1-15-6 TEL03-3833-8241